




**INDICAZIONI PER LA PULIZA E CONTROLLO
PROTESI DENTALE RIMOVIBILE
VIVA FLEX PARTIALS**

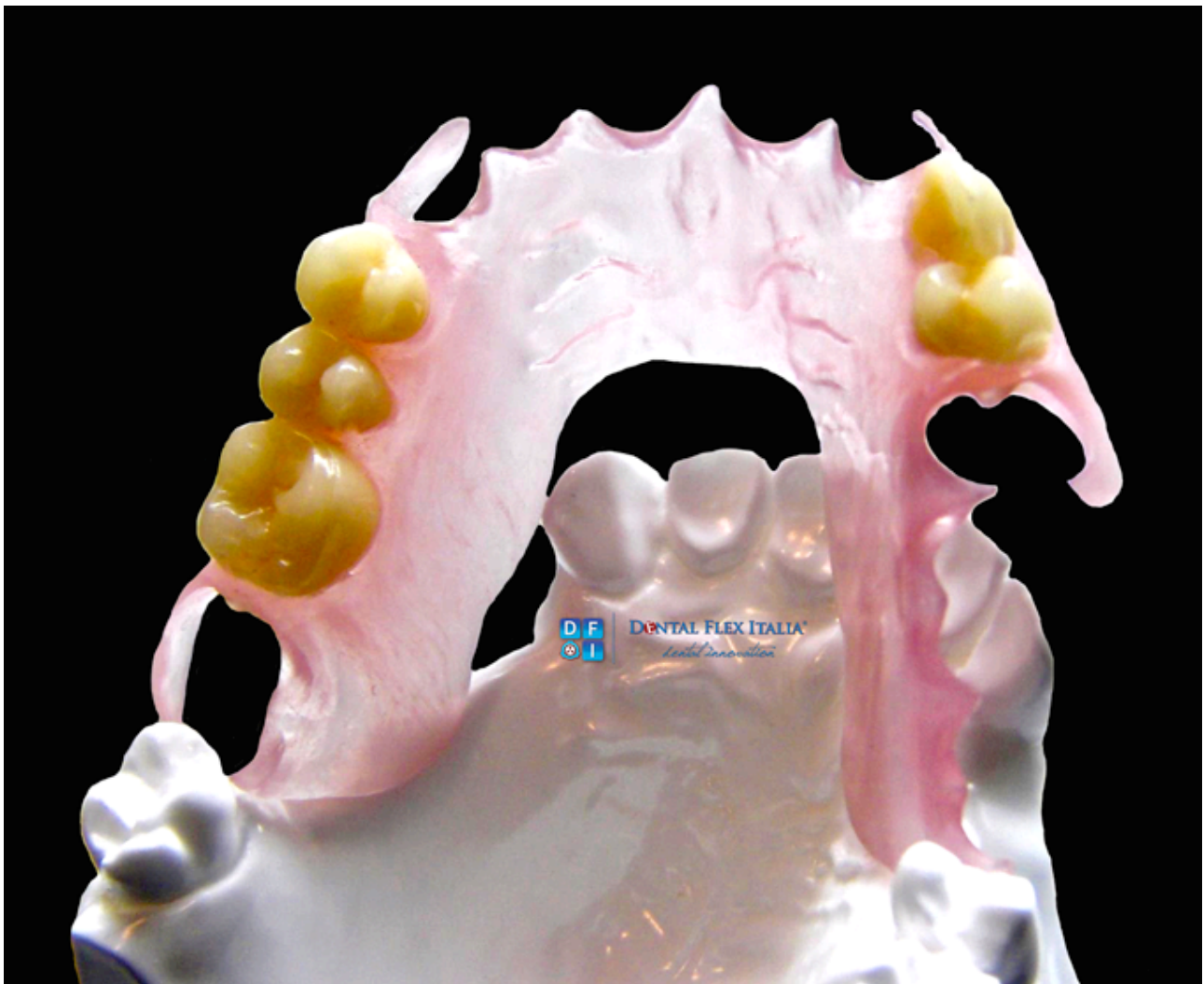

ASSISTENZA AUTORIZZATA

L'assistenza tecnica in caso si riscontrino danni alla protesi dentale può essere eseguita esclusivamente dal professionista che l'ha applicata o dal personale della ditta produttrice Dental Flex Italia S.n.c..

Controlli

Periodicamente è necessario controllare stato della protesi applicata. Per eseguire tale operazione è necessario:

- Lavare la protesi almeno due volte al giorno, soprattutto dopo i pasti.
- Spazzolare la protesi VIVA FLEX PARTIALS con un normale spazzolino da denti sotto acqua corrente.
- È consigliabile eseguire dei controlli periodici sul dispositivo almeno ogni sei (6) mesi, salvo che non subentrino cause di forza maggiore.
- In caso la protesi mostri accumuli di placca o macchie, dovute a una NON corretta igiene orale. È importante che il medico rispedisca la protesi al laboratorio che ha fabbricato la stessa, essi saranno in grado di eseguire operazioni di pulizia o meccaniche.

Pulizia ordinaria

Quotidianamente, almeno due (2) volte al giorno, eseguire il normale igiene orale lavando i denti. Utilizzare spazzolini e dentifrici convenzionali.

Abbate cura della vostra nuova protesi VIVA FLEX PARTIALS!

Dati del produttore

Nome Legale Rappresentante	Gianfranco
Cognome Legale Rappresentante	Guerra
Nome ditta	Dental Flex Italia S.n.c.
Sede ditta: Via e Città	Via Montevergine, 62 – Ospedaletto d'Alpinolo (AV) – 83014 -Italia
P.IVA	02570240644
Nome prodotto	Protesi dentale rimovibile VIVA FLEX PARTIALS
Tel. Ufficio	+39 0825 - 691237
Fax.	+39 0825 - 691237
Email	gianfranco@dentalflexitalia.eu
Sito web	www.dentalflexitalia.eu
Link al prodotto (se esistente)	